



# Flex Bootsien käyttöohje

## Flex Bootsit ovat ainutlaatuiset kaviosuojat

Näiden ohjeiden avulla saat niistä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Lisäohjeita löydät verkkosivuiltamme osoitteesta [www.flexhoofboots.com/fit-size](http://www.flexhoofboots.com/fit-size) tai skannaamalla tämän QR-koodin.



Flex Bootsit on suunniteltu kaikille hevoseläimille joiden kaviot on vuoltu rakenteenmukaisesti. Bootseja kuuluu käyttää osana kokonaisvaltaista kavionhoitoa, johon kuuluu anatomisen vuolun lisäksi oikeanlainen ravinto ja elinympäristö.


Rakenteenmukainen vuolu ja hevosen kehon hoito on tärkeää hevosen hyvinvoinnin kannalta. Nämä seikat vaikuttavat myös Flex Bootsien kestävytyteen.

1

Neopreenipehmuste tulee kiinnittää bootsiin pujottamalla TPU takaosa pehmusteen kuminauhan läpi ja asettamalla kuminauha niin että takaosan niiteistä näkyy noin puolet.

2

Päkiäisremmi kiinnitetään TPU takaosaan niin, että remmin pää viedään takaosan alta, reiästä ulos, ja taas toisesta reiästä sisään. Näin remmi jää näkyväksi takaosan keskellä. Huomaa, että päkiäisremmi on hieman kaareva ja kaaren tulee kääntyä alaspäin molemmista päistä.

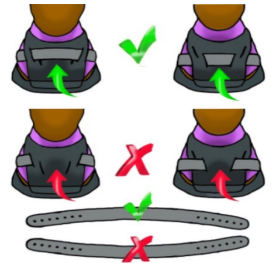

3

Pukiessasi bootseja älä vedä TPU takaosasta vaan pidä kiinni kuoresta molemmin käsin, ja kääntele kuorta niin että saat kavion varvasosan mahdollisimman perille bootsin varvasosaan. Tarkista kuoren rei'istä että varvas on perillä kärkiosassa. Jos näin ei ole, pyydä hevosta ottamaan pari askelta tai lyö kuminuijalla bootsin kärjelle saadaksesi varpaan perille. Tämä on tärkeää, jotta bootsi ei häiritse hevosen askellusta.

4

Kun bootsi on hevosen jalassa, kiinnitä ensin vuohisremmi ja tarkista että neopreenipehmuste istuu hyvin. Sulje tämän jälkeen päkiäisremmi.

5

TPU takaosassa on kaksi korkeusvaihtoehtoa päkiäisremmille. Jos takaosa pussittaa, kannattaa kokeilla matalampaa asetusta. Jos päkiäisremmi jää päkiäisen korkeimmalle kohdalle, nosta remmi ylempiin reikiin.





6

Päkiäisremmi on sopivan tiukalla, kun sen ja jalan väliin mahtuu helposti yksi sormi.


Vuohisremmin ja jalan väliin tulee mahtua helposti kaksi sormea.



7

Aseta neopreenipehmuste niin, että se istuu suorassa vuohisremmin alla ja tarkista että pehmuste yltää yhteen jalan edessä.


Vuohisremmin kuuluu mennä pehmusteen lenkkien läpi niin, että pehmuste istuu ryhdikkäästi edestä eikä sen päät roiku. Remmin pään voit pujottaa pehmusteen lenkkeihin.

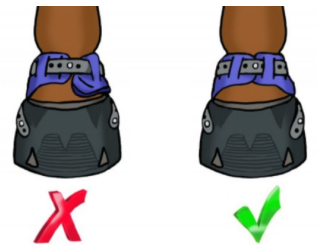

## Puhdistus ja säilytys

Huuhto bootsit vedellä käytön jälkeen tarpeen mukaan, ja ripusta kuivumaan ilmavaan paikkaan pois auringonvalosta. Älä käytä bootsien puhdistamiseen pesuaineita, koska ne saattavat haurastuttaa TPU materiaalia.

TPU:n pitää saada hengittää, joten etään säilytä bootseja esimerkiksi suljetussa laatikossa tai autossasi.

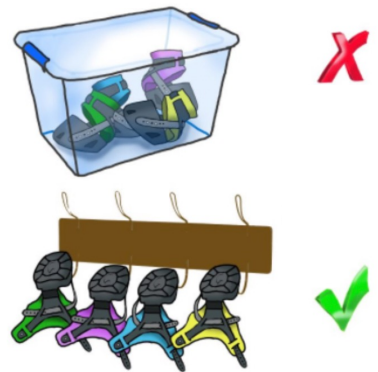

Hevoset ja niiden kanssa harrastus omaa tietty riskit ihmisiin ja omaisuuteen liittyen. Jos käytät Flex Bootseja, tiedostat ja hyväksyt vastuun riskeistä ja niiden seurauksista. Boostit saattavat käytössä irrota hevosen jaloista osittain tai kokonaan, ja näissä tilanteissa hevonen saattaa pelästyä tai kompastua. On hevosen käsittelijän vastuu totutella hevonen näihin tilanteisiin ennenkuin Flex Bootsit otetaan käyttöön. Vainikan Group Oy yhtiönä ei ole millään tavalla vastuussa Flex Bootsien käyttöön liittyvistä seurauksista tai vahingoista ihmisiä, eläimiä tai omaisuutta kohtaan.



Lue lisää: [www.flexhoofboots.com](http://www.flexhoofboots.com) tai laita meille sähköpostia: [helpdesk@flexhoofboots.com](mailto:helpdesk@flexhoofboots.com)

Kuvitukset: Sanni Seppelin